
Kat. č. CB2005 TEST 05 – DUQUENOIS-LEVINE Reagent – test pro orientační identifikaci marihuany, hašiše a hašišového oleje, 1 balení / 10 ks


Určení testu

Test 05 je určen pro orientační identifikaci marihuany, hašiše a hašišového oleje.

Potřebné množství pro testování: marihuana – rostlinný materiál – pár kousků dlouhých alespoň 0,5 cm, THC – množství na špičku nože, hašiš – 300 až 600 mg

Způsob použití

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáček zatřepete různě tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 1 minuty. Barva by se měla vyvíjet od průhledné k světlé žluté.
3. Rozmáčknete prostřední ampuli a testem opět protřepávejte. Budete pozorovat pomalé vyvíjení modrofialové barvy. Když se modrofialová barva nevyvine do 60 sekund, zastavte testování. **Test pro zkoumanou látku by byl neprůkazný.**
4. Když se modrofialová barva vyvíjí, nedovolte, aby se stala tmavě fialová před tím, než rozmáčknete poslední ampuli dle bodu 5.
5. Rozmáčknete poslední ampuli /pravou/ a testem protřepávejte 10 sekund.
6. Klepněte různě testovacím sáčkem o tvrdý povrch tak, aby látky pronikly do sebe. Naklánějte testem pomalu z pravé straně k levé straně. Nenaklánějte testem pod větším úhlem než 45°. Počkejte chvíli, dokud látky neproniknou do sebe a pak se vrstvy barevně oddělí a usadí se.
7. Abychom mohli konstatovat, že je test pozitivní, **spodní vrstva musí být tmavofialová /nachová/,** horní vrstva může být světle nebo tmavě modrá nebo světle nachová.

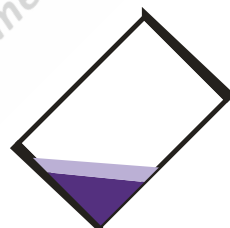

Držte test pod úhlem 45°.
Musí být zřetelně oddělené vrstvy.

Vyhodnocení výsledných barev

1. Vznik spodní vrstvy tmavofialové /nachové/ a horní vrstvy světle nebo tmavě modré nebo světle nachové barvy indikuje pozitivní výsledek pro marihuanu, hašiš nebo hašišový olej.

Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.

6/2015