

*Určení testu*

Test 04 je určen pro orientační identifikaci LSD.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Do sáčku vložte zkoumanou látku. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete, tak aby se testovaný materiál dostal na dno sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě.
3. Rozmáčkněte levou ampuli. Pak test protřepávejte asi 30 vteřin.
4. Rozmáčkněte prostřední ampuli a test protřepávejte asi 30 vteřin. Vznikne-li během 30-60 vteřin fialová barva, znamená to přítomnost LSD.
5. Rozmáčkněte pravou ampuli a test protřepávejte. Fialová barva, která vznikla reakcí s LSD po rozmáčknutí třetí ampule zintenzivní na tmavě fialovou. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Fialová barva, která vznikla po rozmáčknutí druhé ampule a zintenzivnění barvy po rozmáčknutí třetí ampule indikuje přítomnost LSD.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*