

*Určení testu*

Test 09 je určen pro orientační identifikaci PCP a metaqualon.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 30 vteřin. Po této době nevznikne žádné zbarvení.
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte pravou ampuli. Objeví-li se během 30 sekund světle modrá barva nebo růžová s modrými zrnky znamená přítomnost PCP a metaqualonu.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vznik světle modrého zbarvení nebo růžového zbarvení s modrými zrnky indikuje pozitivní výsledek na PCP a metaqualon.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*