

*Určení testu*

Test 14 je určen pro orientační identifikaci Diazepamu, Rohypnolu a Mefedronu

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 30 vteřin. Po této době nevznikne žádné zbarvení.
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete pravou ampuli v její střední části a zlehka protřepete. Přítomnost Valia a Rohypnolu je indikováno světle fialovým zbarvením, které je viditelné po 10 sekundách. Po jedné minutě intenzita fialového zbarvení zesílí.
4. Dojde-li k červenohnědému zbarvení je test pozitivní na Mefedron.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vznik fialového zbarvení indikuje pozitivní výsledek na Valium nebo Rohypnol
2. Vznik červenohnědého zbarvení indikuje pozitivní výsledek na Mefedron

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*