

*Určení testu*

Test 15 je určen pro orientační identifikaci metamfetaminu /pervitin/ a MDMA /Extáze/.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 30 vteřin. Po této době nevznikne žádné zbarvení.
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte prostření ampuli v její střední části a pak testem zlehka protřepete cca 5 vteřin.
4. Může se stát, že při vysokém obsahu metamfetaminu, bude již pozitivní výsledek při rozbití druhé ampule.
1. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte pravou ampuli v její střední části a pak testem zlehka protřepete cca 5 vteřin. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Okamžité tmavě modré zbarvení informuje o přítomnosti metamfetaminu /pervitin/ nebo MDMA /Extáze/.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypete jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*