

*Určení testu*

Test je určen pro orientační identifikaci narkotických alkaloidů.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete ampuli v její střední části.
3. Vytvoří-li se během 20 vteřin krémová usazenina, indikuje to přítomnost narkotických alkaloidů nebo amfetaminů.
4. Testujte nyní zkoumanou látku testem 01 Marquisovo činidlo – test na opiátové alkaloidy.
5. Jestliže se nevyvinula žádná barevná reakce, testujte zkoumanou látku testem 03 – test na barbituráty.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vznik krémové usazeniny indikuje pozitivní výsledek na přítomnost narkotických alkaloidů nebo amfetaminů.
2. Nevznikla-li žádná barva, látku testujte testem 03 DILLE KOPPANYIÚV – test na barbituráty.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypete jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*