

*Určení testu*

Test 22 je určen pro orientační identifikaci metadonu, amfetaminové sloučeniny.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte ampuli v její střední části.
3. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Okamžitý vývin olivové barvy přecházející pomalu do modré indikuje pozitivní výsledek pro metadon.
2. Pomalu se vyvíjející žlutozelená barva indikuje pozitivní výsledek pro metamfetaminy.
3. Pomalu se vyvíjející zelenožlutá barva indikuje pozitivní výsledek pro amfetaminy.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*