

*Určení testu*

Test 24 je určen pro orientační identifikaci MDPV.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete ampuli v její střední části a testem 5 vteřin potřepete.
3. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vývin žluté nebo zelené barvy indikuje pozitivní výsledek pro MDPV.
2. Bez barevné reakce – pokračujte testem 25 - mefedron.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*