

*Určení testu*

Test 25 je určen pro orientační identifikaci Mefedronu /koupelová sůl/.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části silným stlačením mezi prsty. Pak test protřepávejte asi 5 vteřin. Barva se nezmění
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete pravou ampuli v její střední části silným stlačením mezi prsty a sáčkem protřepávejte. Pozorujte zbarvení.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vývin purpurové barvy indikuje pozitivní výsledek pro Mefedron.
2. Vývin růžovo/levandulové barvy není pozitivním výsledkem pro Mefedron.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypete jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*