

Určení testu

Test 30 je určen pro orientační identifikaci Psilocybinu /Psilocinu (čerstvé a sušené plodnice hub, prášek z plodnic hub). Zpravidla se jedná o různé druhy lysohlávek.

Způsob použití

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 30 vteřin. Barva se nezmění. Rozmáčknete pravou ampuli a protřepávejte cca 30 vteřin tak, aby obě látky pronikly do sebe.
3. Pozorujte zbarvení.

Vyhodnocení výsledných barev

1. **Psilocybin:** vznik růžové barvy indikuje pozitivní výsledek na Psilocybin.
2. **Psilocin:** rychlý vznik fialové barvy indikuje pozitivní výsledek na Psilocin.

Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.