

NÁVOD K POUŽITÍ ORIENTA NÍCH DROGOVÝCH TEST



DRUGWIPE® 5+

Pouze pro detekci drog ze SLIN.

Jen pro profesionální použití.

kat. číslo CF1100




1. Před provedením testu zkontrolujte, zda není stříbrný obal poškozený. Zkontrolujte také datum spotřeby (datum expirace). Test s prošlým datem vyřadte.

2. Stříbrný obal otevřete u horního obdelníku v místě perforace a test z obalu vyndejte. Stříbrný obal nevyhazujte, viz. poznámka dole.

3. V testovacím okénku jsou svítící modré čáry, které po provedení testu zmizí.


4. Oddělte modrý stříbový panel od bílého testovacího panelu.

5. Požádejte testovanou osobu, aby si jazykem olízla vnitřní stranu tváře. Testované osobě kruhovým pohybem lehce sete sliny z jazyka.

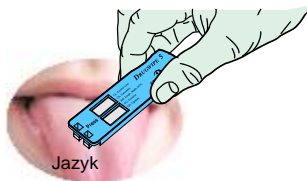

6. Stříbový panel zacvaknete zpět do bílého testovacího panelu tak, abyste uslyšeli slabé zacvaknutí.

7. Test dejte do svislé polohy. Terčik na ampulce s vodou stisknete zvolna tak, abyste ampulku s vodou rozmáčkli. Po rozmáčknutí držte test ve svislé poloze 10 - 15 sekund. Z rozlomené ampulky se uvolní voda, která aktivuje vyvolávání testu.

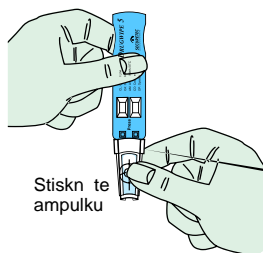


8. Test dejte do vodorovné polohy po dobu cca 3 - 8 minut, max. 10 minut.

9. V testovacím okénku se u nápisu CL (Control Line) objeví svítící červená kontrolní linka. Pokud je testovaná osoba pod vlivem jaké drogy, svítící červená testovací linka nebo dokonce linky se objeví v testovacím okénku v místě se zkratkou drogy.

Slabá červená, přerušovaná nebo krátká linka, nebo i pouhý červený bod, v testovacím okénku u zkratky drogy indikuje pozitivní přítomnost drogy.

- CA - test je pozitivní na Cannabis (Marihuana)
- AM - test je pozitivní na Amfetamin, Metamfetamin/Extázi
- CO - test je pozitivní na Kokain
- OP - test je pozitivní na Opiáty
- CL - kontrolní linka funkce testu

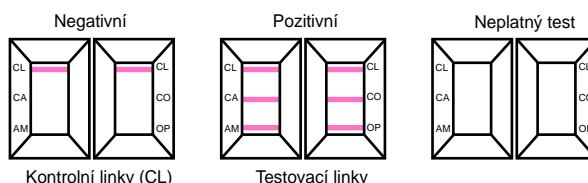

Pokud se v testovacím okénku u nápisu CL neobjeví žádná svítící červená kontrolní linka, test je neplatný a testování se musí opakovat s novým testem. Tento test je orientačním testem. Definitivní potvrzující výsledek testu je toxikologický rozbor vzorku krve nebo moči. Metodika zadržování nebo vymáhání práva mohou stanovit jiný diagnostický postup. Používáte-li testy DRUGWIPE v nepříznivých povětrnostních podmínkách, chráňte před deštěm testovací okénko. Nikdy se nedotýkejte stříbových částí. Pracovní rozsah teplot 0 do +40 °C, dlouhodobé skladování +5 do +25 °C.



Výrobce: Securetec Detektions-Systeme AG, Eugen-Sänger-Ring 1D-85649 Brunthal/München Tel.: +4989203080-1651
Distributor: LT Sezam s.r.o., Karlovarská 30/378, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 235 325 544