

Orientační drogový test z moče na detekci 5 drog (pohárek EcoCap)

kat. číslo CD1040

Jen pro profesionální použití

Detekuje tyto drogy:

Amfetamin (AMP)	Proužek světle zelený
Metamfetamin (METH)	Proužek oranžový
Opiáty (MOR)	Proužek fialový
Kokaín (COC)	Proužek zelený
Marihuana (THC)	Proužek hnědý



Postup

Před použitím musí mít test pokojovou teplotu.

Krok 1 – Otevřete sáček, v němž je testovací pohárek a 2 sady ochranných rukavic. Na testovacím pohárku v místě k tomu určeném, napište identifikační údaje testované osoby včetně data.

Krok 2 – Testovaná osoba si navlékne jednorázové rukavice pro odebrání vzorku moče. Otevře víčko testovacího pohárku a vymočí se přímo do pohárku. Ujistí se, že množství moče je v rozmezí minima 30 ml a maxima 70 ml (viz stupnice na pohárku).

Krok 3 – Po naplnění testovacího pohárku uzavře víčko pohárku a předá jej uzavřený testující osobě.

Krok 4 – Testující osoba použije druhý pár jednorázových rukavic. Sloupne krycí (modrou) pásku a vyhodnotí výsledek testování.

Výsledek se objeví do 5 minut, a platný zůstane do 10 minut.

Čtení výsledků



Na testovacích proužcích uvnitř pohárku se nad barevným proužkem příslušné drogy vybarví, případně nevybarví linie.

Kontrolní linie (symbol C, horní) se musí vybarvit vždy. Když se nevybarví, test je pro ten daný druh drogy neplatný.

Testovací linie (symbol T, dolní) na testovacím proužku slouží k určení, zda má testovaná osoba v moči drogu či ne. Když se linie na barevném proužku příslušné drogy **vybarví**, droga v moči není – **negativní test**. Když se **nevybarví**, droga v moči je – **pozitivní test**.