


Orientační drogový test z moče (kazeta) DrugControl

Kat. číslo: CD1002 COC, CD1006 AMP, CD1011 MDMA, CD1016 MAMP, CD1021 MOR, CD1026 THC


Jen pro profesionální použití

Postup

- Před použitím musí mít test pokojovou teplotu
- Připravte si vzorek moče do vhodné nádoby. Vyjměte z ochranného obalu testovací kazetu a pipetu.
- Pipetou nasajte vzorek moče z nádoby.
- Držte pipetu svisle a nakapejte 5 – 6 kapek moče do okénka kazety, které je označené písmenem „S“.
- Výsledek se objeví do 5 minut a platný zůstane do 10 minut.

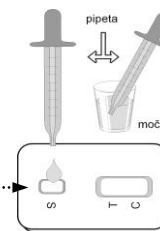

Čtení výsledků

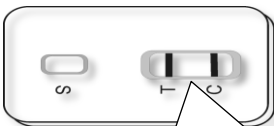


NEGATIVNÍ TEST

Do 5 minut se objeví dvě červené linie. Jedna v kontrolním poli „C“ a druhá v poli „T“. V testovacím vzorku není příslušná droga, test je negativní.



POZITIVNÍ TEST

V kontrolním poli „C“ se objeví červená linie. V poli „T“ linie není. Ve vzorku byla detekována příslušná droga, test je pozitivní.

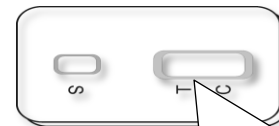

NEPLATNÝ TEST

V kontrolních polích „C“ a „T“ se neobjeví žádná červená linie. Test byl špatně proveden nebo vzorek obsahuje příměsi, které výsledek znehodnocují. Opakujte s novým testem.