


Orientační drogový test z moče (panel) DrugControl 5 drog

Kat. číslo: CD1031 (AMP, MAMP,THC,COC,MOR)


Jen pro profesionální použití

Postup

- Před použitím musí mít test pokojovou teplotu
- Připravte si vzorek moče do vhodné nádoby (nádobka musí mít Ø nejméně 55 mm). Vyjměte z ochranného obalu testovací panel.
- Odstraňte ochranné víčko z panelu a ponořte savé proužky na cca 10 vteřin do vzorku moče v nádobce. *Plastovou část panelu nikdy do moče neponořujte.*
- Výsledek se objeví do 5 minut a platný zůstane do 10 minut.

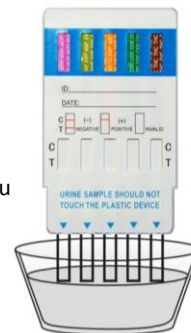


Čtení výsledků

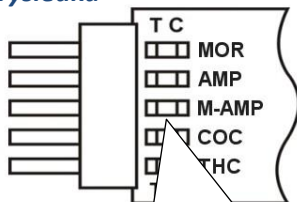


NEGATIVNÍ TEST

V každém z pěti testovacích polí se objeví dvě červené linie. V testovacím vzorku není příslušná droga, test je negativní.

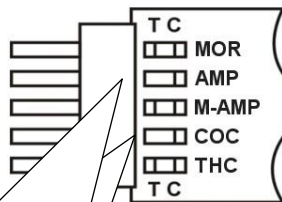

POZITIVNÍ TEST

V jednom nebo ve více z pěti polí se objeví v kontrolním poli „T“ červená linie. V testovaném vzorku je detekována droga, v tomto případě amfetamin a kokain.

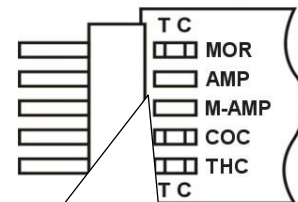

NEPLATNÝ TEST

V jednom nebo ve více z pěti polí se neobjeví žádná linie. Test byl špatně proveden nebo vzorek obsahuje příměsi, které výsledek znehodnocují. Opakujte s novým testem.