


Orientační drogový test z moče (oboustranný panel) DrugControl 10 drog

Kat. číslo: CD1036 (MDMA, AMP, MET, BAR, BZO, TCA, COC, MAMP, MOR, THC)

Jen pro profesionální použití


Postup

- Před použitím musí mít test pokojovou teplotu
- Připravte si vzorek moče do vhodné nádoby (nádobka musí mít \varnothing nejméně 55 mm). Vyjměte z ochranného obalu oboustranný testovací panel.
- Odstraňte ochranné víčko z panelu a ponořte savé proužky na cca 10 vteřin do vzorku moče v nádobce. *Plastovou část panelu nikdy do moče neponožte.*
- Výsledek se objeví do 5 minut a platný zůstane do 10 minut.

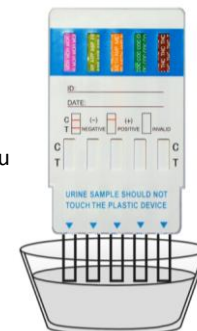


Čtení výsledků

Výsledky čtěte z obou stran panelu

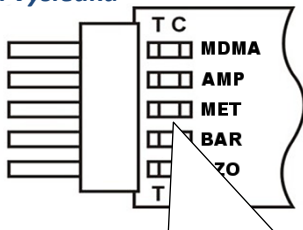


NEGATIVNÍ TEST

V každém z deseti testovacích polí se objeví dvě červené linie. V testovacím vzorku není příslušná droga, test je negativní.

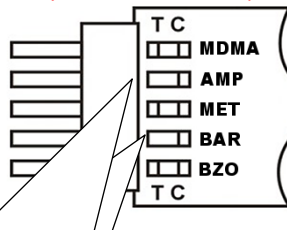

POZITIVNÍ TEST

V jednom nebo ve více z deseti polí se objeví v kontrolním poli „T“ červená linie. V testovaném vzorku je detekována droga, v tomto případě amfetamin a kokain.

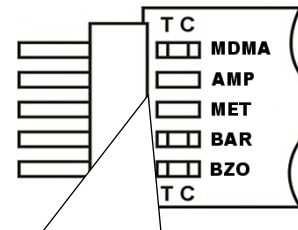

NEPLATNÝ TEST

V jednom nebo ve více z deseti polí se neobjeví žádná linie. Test byl špatně proveden nebo vzorek obsahuje příměši, které výsledek znehodnocují. Opakujte s novým testem.