


Skladování a použití

Pokud test používáte v dešti nebo když sněží, zajistěte ochranu testu DrugWipe® 6 S před vlhkostí.


Použitá a prošlé testy zlikvidujte spolu s ostatním nerecyklovatelným odpadem. Dodržujte prosím místní předpisy o likvidaci odpadu.

Nesprávné skladovací podmínky, jako například vysoké teploty nebo mráz, test poškodí.

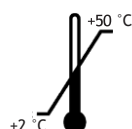

+2 až +50 °C Používejte DrugWipe® v tomto rozmezí teplot.

Vyhýbejte se teplotám nad +50 °C, protože mohou test poškodit.

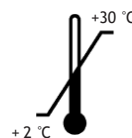

+2 až +30 °C Skladujte DrugWipe® pouze v tomto rozmezí teplot.

Kontrola kvality

Test DrugWipe® 6 S má integrovanou kontrolní linku (CL). Kontrolní linka ukazuje, že test je plně funkční a že byl screeningový test správně proveden.

Dodržujte prosím všechny další předpisy pro kontrolu kvality platné ve vaší instituci či organizaci.

Vysvětlení symbolů

	Čtete návod k použití
	Teplotní omezení
	Datum expirace
	Výrobce
	Kód šarže
	Na jedno použití

Křížové reakce

Látky, které způsobují křížové reakce s testem DrugWipe® 6 S, jsme testovali v naší laboratoři.

Další informace pro registrované uživatele najdete na: www.securetec.net



DrugWipe® 6 S Návod k použití

Test ze slin pro detekci

- Benzodiazepinů
- Marihuany/kanabisu
- Amfetaminů/metamfetaminů
- Kokainu
- Opiátů

S 604 G

Distributor:

LT SEZAM s.r.o.
Karlovarská 378/30, 161 00 Praha 6, Tel.: +420 235 325 544
www.drogovetesty.cz



Securetec Detektions-Systeme AG
Lilienthalstraße 7 · 85579 Neubiberg · Německo
T +49 89 203080-1651 · F +49 89 203080-1652
info@securetec.net · www.securetec.net

© 2024 Securetec Detektions-Systeme AG · 70236-v01-CS-2024-11-18

we detect to protect

Použití testu

Test DrugWipe® 6 S je určen k použití pro kvalitativní detekci drog v lidských slinách kvalifikovanými odborníky.

Test detekuje benzodiazepiny, kanabis, amfetaminy/metamfetaminy (včetně MDMA/extáze), kokain a opiáty. Testování poskytuje orientační výsledky (screeningová procedura). Laboratorní ověření výsledků je vyžadováno, zejména pokud je test pozitivní. Upřednostňované širokospektrální metody jsou kapalinová nebo plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (LC/MS, GC/MS).

Princip testu

DrugWipe® 6 S je rychlý imunologický screeningový test. Sběračem pro odběr vzorku je vzorek přenesen na testovací proužky, které obsahují specifické protilátky pro jednotlivé drogy. Pokud vzorek obsahuje drogy, naváží se na příslušné protilátky.

Testování je zahájeno, jakmile rozmáčknete integrovanou ampulku, a tím dojde k uvolnění tekutiny. Tekutina pomáhá přenášet drogy navázané na protilátky směrem k testovací lince. Červenou testovací linku vyhodnoťte vizuálně.

Obsah balení

Balení obsahuje 25 testů DrugWipe® 6 S a návod k použití. Každý test je samostatně zabalený a obsahuje

1 test DrugWipe® 6 S na sliny, 1 ampulku s vodou a 1 vysoušecí prostředek.

Před provedením testu si přečtěte

1. Test DrugWipe® 6 S je pouze na jedno použití.
2. Testovaná osoba nesmí 10 minut před testováním nic jíst ani pít.
3. Pokud prošlo datum expirace, test nepoužívejte.
4. Pokud je balení poškozené či obsahuje vlhkost nebo pokud je kontrolní linka už zbarvená červeně, test nepoužívejte.
5. Sliny mohou být potenciálně infekční. Aby nedošlo ke kontaktu se slinami, doporučujeme použít jednorázové rukavice.
6. Obal testu otevřete bezprostředně před testováním.
7. Místo pro otevření testu je na obalu označeno.

Postup testování



1. Sejměte modrý sběrač vzorku z bílé kazety testu. **Nedotýkejte se stěrových polštářků.**



2. Testování ze slin


Požádejte testovanou osobu, aby si jazykem třikrát olízla vnitřní strany tváře. Poté sběračem vzorku 2× setřete sliny z jazyka nebo vnitřní strany tváře.



3. Vraťte zpět sběrač vzorku na kazetu testu. **Sběrač vzorku musí zacvaknout se slyšitelným dvojitém cvaknutím.**



4. Kazetu testu držte svisle - integrovanou ampulkou směrem dolů. **Jednou silně zatlačte palcem přiloženým vodorovně na integrovanou ampulku v místě slova PRESS, dokud ampulka nepraskne. Držte kazetu svisle dalších 10 sekund, jak ukazuje obrázek.**

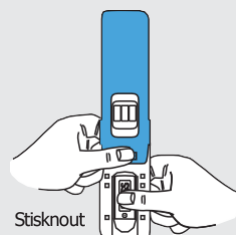

5. **Položte test na vodorovnou plochu.** Výsledek testu se objeví do minut.



Interpretace výsledků

- V případě silně pozitivních vzorků může být výsledek viditelný již za 3 minuty.
- Výsledky testu odečítejte po 5 minutách.
- Výsledky zůstávají platné do 180 minut po skončení testování.
- Výsledek testu je interpretován jako pozitivní i v případě, že se testovací linky zabarvily slabě nebo neúplně.
- Pokud je to nutné pro vyhodnocování výsledků testu, zajistěte si dostatečné osvětlení, například pomocí baterky.

Odečítací okénko ukazuje pro každý testovací proužek 2 skupiny drog a kontrolní linku.

Význam použitých zkratk:

BZO	benzodiazepiny
THC	kanabis (marihuana/hašiš)
AMP	amfetaminy
MET	metamfetaminy (MDMA/extáze)
COC	kokain (crack)
OPI	opiáty (heroin/morfin)
CL	kontrolní linka

CL	CL	CL
BZO	AMP/ MET	COC
THC		OPI

Negativní výsledek = nebyly užity žádné drogy

Aby byl test platný, musí se všechny kontrolní linky zbarvit červeně. Test je negativní pro drogy, jejichž testovací linka se nezbarví červeně.

CL	CL	CL
BZO	AMP/ MET	COC
THC		OPI

Pozitivní výsledek = byly užity drogy

Aby byl test platný, musí se všechny kontrolní linky zbarvit červeně. Test je pozitivní pro drogy, jejichž testovací linka se zbarví červeně.

CL	CL	CL
BZO	AMP/ MET	COC
THC		OPI

Neplatný výsledek

Test je neplatný, pokud se jedna nebo více kontrolních linek nezbarví červeně. Opakujte testování s novým testem DrugWipe® 6 S.