

Kat. č. CB2007 TEST 07 – SCOTT REAGENT (modifikovaný) - test na soli kokainu a báze kokainu, 1 balení / 10 ks

Určení testu

Test 07 orientačně identifikuje soli kokainu /HCl/ a báze kokainu /krek/.


Způsob použití

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části a pak testem krátce potřepete. Při přítomnosti soli kokainu /HCl/ vznikne modrá barva. Při přítomnosti pouze báze kokainu (krek) vznikne jen lehké zbarvení do modra. Pokud se modrá barva nevyvine během několika málo vteřin, přidejte větší množství zkoumané látky. Když i pak modrá nevznikne, ukončete testování.
3. Rozmáčknete prostřední ampuli a testem lehce zatřepete. Modrá barva se změní na růžovou. Rozmáčknete pravou ampuli a testem lehce zatřepete. Počkejte až se obě vrstvy oddělí. Růžová horní a modrá spodní vrstva znamená přítomnost kokainu.

Vyhodnocení výsledných barev

1. Vznik spodní vrstvy modré a horní vrstvy růžové indikuje pozitivní výsledek na kokain.

Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypete jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu

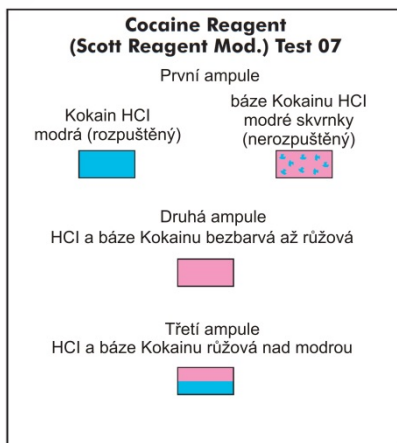

6/2015