

*Určení testu*

Test 03 je určen pro orientační identifikaci barbiturátů.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě.
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části silným stlačením mezi prsty. Pak test protřepávejte asi 30 vteřin.
4. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete pravou ampuli v její střední části silným stlačením mezi prsty a sáček protřepávejte. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Světle fialové zbarvení znamená přítomnost barbiturátů.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*