

*Určení testu*

Test 02 se používá jako ověřovací test pro amfetaminové sloučeniny, heroin a opiátové alkaloidy. Nepoužívá se samostatně, ale jako další krok po testování testem 01.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete ampuli v její střední části silným stlačením mezi prsty. Po rozmáčknutí ampule zatřepete obsahem sáčku tak, aby se chemikálie promísila s testovaným materiálem.
3. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Oranžová barva se velice rychle mění v červenou a pomalu do žluté barvy, to znamená přítomnost morfinu.
2. Žlutá barva se pomalu mění ve světle zelenou, to znamená přítomnost heroinu
3. Bezbarvosť nebo velice bledý nádech žluté znamená přítomnost amfetaminových sloučenin.
4. Jiné zbarvení znamená přítomnost jiných drog.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*