

*Určení testu*

Test 11 je určen pro identifikaci všech forem heroinu - bílého, hnědého a černé dehtovité formy („tar“) a MDMA (Extáze/).

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 30 vteřin. Pokud se objeví purpurová barva, znamená to přítomnost MDMA /Extáze/.
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčknete pravou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 30 - 45 vteřin. Vznik zeleného zbarvení znamená přítomnost heroinu. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vznik purpurového zbarvení po rozmáčknutí první ampule indikuje pozitivní výsledek na MDMA /Extáze/.
2. Vznik zeleného zbarvení po rozmáčknutí obou ampulí indikuje pozitivní výsledek na heroin.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*