

*Určení testu*

Test 12 je určen pro orientační identifikaci pentazocinu, který je obsažen Talwinu®.

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku. Na dno sáčku vložte pomocí papírové lžičky malé množství zkoumané látky. Testovací sáček opět uzavřete svorkou a sáčkem zatřepete rázně tak, aby se testovaný materiál usadil na dně sáčku.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte levou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 1 minuty. Je-li přítomný Talwin vznikne během následných 1-2 minut purpurová barva.
3. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte pravou ampuli v její střední části a pak testem důkladně protřepávejte po dobu 15 sekund. Změnou barvy na žlutou je potvrzena přítomnost Talwinu.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Pomalu vznikající purpurová zbarvení po rozmáčknutí první ampule a následující okamžité žluté zbarvení po rozmáčknutí druhé ampule indikuje pozitivní výsledek na Talwin.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypte jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*